



# SWANGARD

## REDDINGSVEST



### ALGEMENE NOTITIES

Deze handleiding bevat algemene instructies voor het gebruik, de werking en de verzorging van de SWANGARD.

De handleiding illustreert het gebruik van de SWANGARD in een ideale omgeving. Andere, en soms ongebruikelijke omstandigheden kunnen zich voordoen in het werkveld. De SWANGARD kan in veel van deze omstandigheden worden toegepast. Het is de verantwoordelijkheid van gekwalificeerd medische en brandweerpersoneel om de toestand van de patiënt te beoordelen en de juiste apparatuur en procedures te bepalen.

Veilig en correct gebruik van de SWANGARD is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker. Alle andere veiligheidsmaatregelen die door de gebruiker worden genomen, moeten binnen en in inachtneming van de toepasselijke regelgeving vallen. Het wordt aanbevolen vooraf een training te volgen in het juiste gebruik van de SWANGARD voordat dit product in een werkelijke situatie gebruikt wordt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Voeg het toe aan het product in het geval van overdracht naar nieuwe gebruikers.

### VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- Ongetrainde gebruikers kunnen letsel veroorzaken of gewond raken.
- Sta alleen opgeleid personeel toe om de SWANGARD toe te passen
- Oneigenlijk gebruik van de SWANGARD kan letsel veroorzaken
- Gebruik de SWANGARD alleen voor het in de handleiding beschreven doel

### VAARDIGHEDEN VAN DE GEBRUIKER:

- Voldoende kennis hebben van spoedeisende patiëntbehandelingsprocedures (A-B-C-D-E procedure)
- Het vermogen hebben om een patiënt te helpen

### IN GEBRUIK NEMEN VAN DE SWANGARD

- Lees de handleiding zorgvuldig
- Controleer de SWANGARD op gebreken (Voer een inspectie uit volgens de instructies uit deze handleiding)
- Train en oefen het toepassen van het vest

### ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

Volg de richtlijnen van de medisch-leider bij het gebruik van de SWANGARD. Wanneer aanbevolen, stabiliseer tijdens het aanbrengen en gebruiken van de SWANGARD, het hoofd en/of nek van de patiënt handmatig of breng een nekspalk aan.

### DE SWANGARD TOEPASSEN BIJ EEN ZWANGERE PATIËNT

Het sluiten van het vest van is hierbij afhankelijk van de buik- en borstomvang van de patiënt. Over het algemeen volstaat het om de banden zover te sluiten dat beide armen worden ingesloten in het vest.

### BELANGRIJK:

- Een onbewaakte patiënt kan verder gewond raken.
- Blijf te allen tijde bij de patiënt.
- Bevestig geen apparatuur of voorwerpen van welke aard dan ook aan de SWANGARD.
- Het bevestigen van ander apparatuur of onderdelen aan de SWANGARD kan letsel veroorzaken.

### LET OP!

Houdt er rekening mee dat de SWANGARD bij sommige patiënten mogelijk niet past.

### ONDERHOUD

De SWANGARD vereist na gebruik onderhoud. Volg het bijgeleverde was en desinfecteringsadvies op. Laat de SWANGARD volledig drogen


### BEHOUD VAN DE SWANGARD

Belangrijk!  
Het opslaan van een vochtige of natte SWANGARD in de draagtas zal de groei van schimmel stimuleren.  
Breng de SWANGARD pas terug in de draagtas als deze goed droog is.

### HET INSPECTEREN VAN SWANGARD

- Zijn alle componenten aanwezig?
- Controleer of gespen en haken vrij zijn van zichtbare beschadigingen en werken deze zoals bedoeld
- Is het vest vrij van overmatige slijtage en zijn de stiksel intact?
- Is het vest schoon?


# HANDLEIDING SWANGARD IN COMBINATIE MET DE BEVRIJDINGSTECHNIEK "TUNNEL"

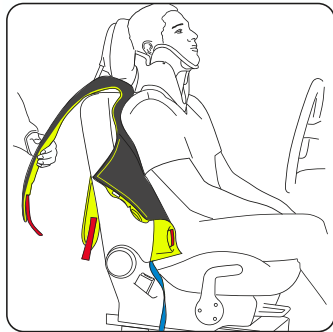

**STAP 1**  
Vouw het vest open.


Breng ter hoogte van de schouders van de patient het vest tussen de rugleuning en de patient aan. Houdt hierbij het bovenlichaam van de patient iets naar voren.

Trek met behulp van de blauwe linten het vest tussen de rugleuning en de patient naar beneden. Tot aan de zitting van de stoel.

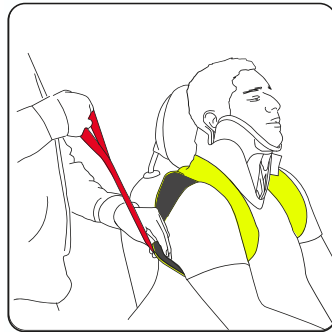


**STAP 2**  
Sla de schouderbanden met de rode trekkoorden onder de oksels naar achteren door. Neem de rode trekkoorden uit de schouderbanden en laat deze achter over de rugleuning hangen.

Leg de onderarmen op de schoot van de patient, sla de zijken van het vest om de patient zodat de armen onder het vest terecht komen.

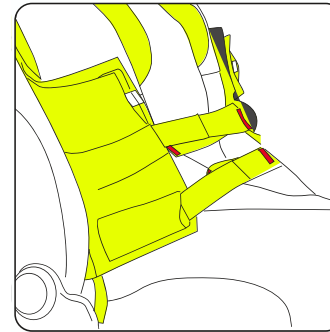

**STAP 3:**  
Sluit het vest met de vier klittenbandsluitingen die aan de voorzijde van het vest zijn verwerkt.


**LET OP!**  
Sluit de banden niet te strak.  
Voorkom ademhalingsproblemen bij de patient.

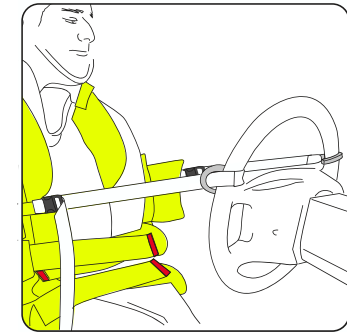

**STAP 4:**  
Neem beide spanbanden met haken uit de tasjes die aan het vest bevestigd zijn en haak deze vast.


De tasjes zijn los te maken waardoor de spanbanden in elke hoek, ten opzichte van het vest, te bevestigen zijn.

B.v. wanneer het de bestuurder betreft aan het stuurwiel. Span nu de spanbanden aan zodat de patient iets uit de rugleuning komt.

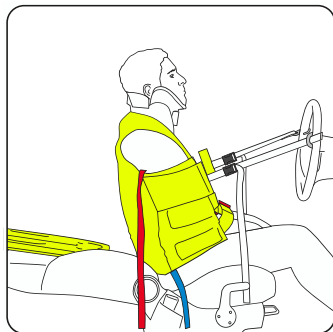


**STAP 5:**  
Breng de rugleuning in de ligpositie, of wanneer dit niet meer mogelijk is, verwijder de rugleuning.

Breng het spineboard in positie, ondersteun de patient, maakt de spanbanden los door de sluitingen in te drukken en leg de patient op het spineboard.

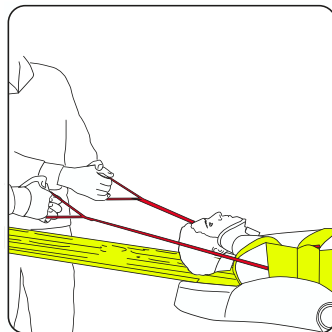

**STAP 6:**  
Trek vervolgens de patient met behulp van de rode banden op het spineboard.

Plaats vervolgens het hoofdeinde van het spineboard met patient op het voeteneinde van de branchard waarin het vacuum-matras gereedligt, en trek met de rode banden de patient over het spineboard in het vacuum-matras. Met deze werkwijze wordt de patient zonder spineboard vervoerd.

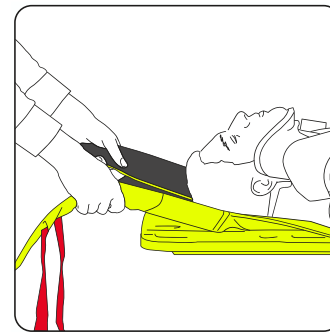

**STAP 7:**  
Maakt het vest open, neem de schouderbanden onder de oksels vandaan en trek met de rode banden het vest nu onder de patient vandaan.

**TIP!**  
Wanneer het niet mogelijk is de patient via de tunneltechniek te bevrijden maar via de zijkant van het voertuig uit het voertuig genomen moet worden, kan je de rode trekkoorden een aantal keer om je handen slaan zodat de trekkoorden korter worden. Op de wijze creëer je een goed grip om de patient uit het voertuig te kunnen nemen.